

FICHA TÉCNICA

INDUMAX PRESSURIDERM HARMONY FILLER CA



- EXCLUSIVO PREENCHEDOR E BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO PARA TÉCNICA DE INTRADERMOTERAPIA PRESSURIZADA;
- PRODUTO PIONEIRO PARA O MERCADO DERMOCOSMÉTICO DA ESTÉTICA;
- FORMADO POR UMA REDE MACROMOLECULAR QUE INCORPORA HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO E ÁCIDO HIALURÔNICO RETICULADO;
- DUPLA AÇÃO: VOLUMIZADOR E BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO (EFEITO IMEDIATO E DURADOURO);
- INDICAÇÕES: SULCOS, MENTO, MALAR, ZIGOMÁTICO, CONTOURO E ÂNGULO DE MANDÍBULA;
- INGREDIENTES ALTAMENTE BIOCOMPATÍVEIS E BIODEGRADÁVEIS;
- FORMULAÇÃO 7 FREE: CONSERVANTES, CORANTES, SULFATOS, GLICÓIS, PETROLATOS, ÁLCOOL, FRAGRÂNCIAS;
- PRODUTO ESTÉRIL – TECNOLOGIA G-TEC.

PRINCÍPIOS ATIVOS:

Hidroxiapatita de Cálcio (30%): Estimula a produção natural de colágeno e age na recuperação, firmeza e elasticidade da pele. Como a Hidroxiapatita não é absorvida de forma tópica, o uso através da técnica de pressurização, suas microesferas induzem a uma leve resposta inflamatória estimulando dessa forma a formação de novo colágeno por tempo prolongado.

Ácido Hialurônico Reticulado (35%): Ácido hialurônico reticulado de origem biotecnológica associado à diversas vitaminas essenciais à pele (**B1 + B2 + B5 + B6 + B9 + B12**).

Idealift™: Lipopeptídeo que reduz os efeitos da gravidade na pele, através do lifting e estímulo de moléculas que aumentam a sustentação e resistência viscoelástica da elastina.

Silício Orgânico: Componente estrutural do tecido conectivo que atua na conexão de elementos da matriz extracelular.

Nopigmerin: Fator de crescimento de terceira geração com intensa ação depigmentante.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

G-PRIME	ALTO G-PRIME
AGENTE CROSSLINK	BDDE < 2PPM
GRAU DE RETICULAÇÃO	MÉDIO
CONCENTRAÇÃO	HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO = 30% ÁCIDO HIALURÔNICO = 35%

MECANISMO DE AÇÃO:

Através da associação inteligente de peptídeos específicos com alto reconhecimento biológico atuam na bioestimulação de colágeno de forma efetiva e prolongada.

RESULTADOS:

Preenchimento dos sulcos, projeção de ângulos da face, melhora da flacidez local, através da ação da hidroxiapatita de cálcio. Sistema antiage avançado para a pele.


MODO DE USAR:

Com auxílio de uma seringa e agulha aspirar todo conteúdo do **Indumax Pressuridem Harmony Filler Ca**, em seguida aspirar 4 ml de **Soro Fisiológico Estéril**, e com auxílio da torneira de 2 ou 3 vias homogeneizar. Na sequência seguir com a técnica de aplicação da Intradermoterapia Pressurizada.

Obs.: NECESSÁRIO USO DE SERINGA E AGULHA ESTÉREIS PARA PREPARO DA SOLUÇÃO.

Aplicar sobre a pele, o **Ozonio-Ox Loção Energizante Facial** acomodando o produto sobre todas as áreas de aplicação.

MAPA DE APLICAÇÃO - SUGESTÃO:

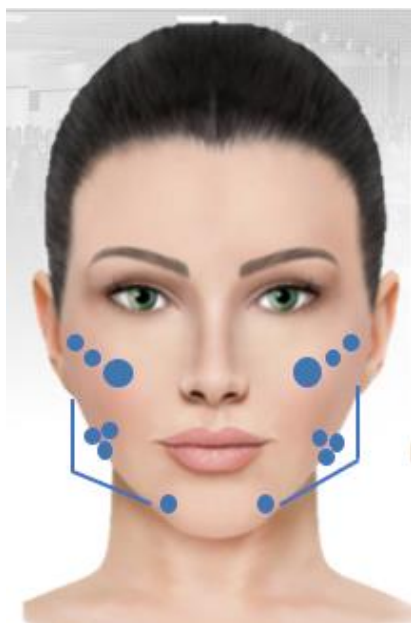

PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO EM ROSTO COM FORMATO CORAÇÃO:

Intervalo: quinzenal ou mensal

Volume: 0,05 a 0,1ml por ponto

Aplicação: Com estiramento da pele

Ângulo da pressurização (alavanca): 90°

Atuação: Subcutâneo

Ângulo da Injector em relação a pele: 45° a 90° (conforme anatomia da área).

ADVERTÊNCIA.: Para este protocolo não existe padronização de aplicação! O produto Indumax Pressuridem Harmony Filler Ca deve ser aplicado conforme a necessidade individual de cada rosto.

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

- ✓ Produto NÃO deve ser aplicado na região frontal, área dos olhos e labial;
- ✓ Após aplicação profissional recomendamos a utilização do alta frequência sobre as pápulas e Ozonio-OX Loção Energizante Facial;
- ✓ Evitar exposição solar direta sobre a área de tratamento (72 horas);
- ✓ Indicar HOME CARE Ozonio-OX Ozon Lift ou Ozon Clear (manutenção reparadora)

RENTABILIDADE:

Aproximadamente 160 disparos de 0,05 ml por frasco.

8,0 ml (produto + soro estéril) ÷ 0,05 ml = 160 pontos.

Rentabilidade Total (caixa com 3 frascos) = 480 pontos.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com três frascos de 4ml.